

PCR – moleculair onderzoek

Soort onderzoek	PCR
Te onderzoeken patiënten-materiaal	Vocht en/of slijm uit de neus en/of de oro- of nasopharynx, blaas- of blaasjesvocht, urine, uitstrijken urogenitaal, enz. NB: Indien PCR dermatophyten wordt aangevraagd, een steriel potje met haar, huidschilfers of nagels inzenden (geen eSwab) NB: indien er genoeg vocht beschikbaar is, enkele cc daarvan in een steriel potje insturen.
Afname materiaal	Gebruik het zogenaamde UTM-setje (zie foto hieronder) met in het zakje: - 1 wattenstok voor afname materiaal. Stokken na afname in het UTM-verzendmedium plaatsen - buisje met verzendmedium UTM (dit is een virustransportmedium) Deze afname setjes kunnen besteld worden bij het centrale magazijn.
Afbeelding afnamemateriaal	Buisje met UTM-medium + wattenstok voor uitstrijk van lichaamsmateriaal t.b.v. moleculair onderzoek naar virussen en/of bacteriën. 
Afname instructies	• Neem materiaal af • Noteer naam en geboortedatum van de patiënt op het etiket
Aanvraagformulier	Digitale aanvraag in HIX SC of LMMI aanvraagformulier. Voorzie deze van: - benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, eerste ziektedag, datum van afname etc. - soort materiaal - gevraagd onderzoek
Transport naar laboratorium	Zo mogelijk op dag van afname op het LMMI (laten) bezorgen.

	Zie logistiek en transport
Bewaren na afname	Kan in UTM medium tot max. 2 dagen na afname bewaard worden bij kamertemperatuur of in de koelkast.
Geschatte duur onderzoek	1-4 dagen; positieve en/of belangrijke uitslagen worden doorgaans binnen 1-2 dagen telefonisch doorgegeven.