

Pleuravocht

Soort onderzoek	Kweek (of ander onderzoek) uit pleuravocht.
Te onderzoeken patiënten-materiaal	Pleuravocht dat via punctie of uit een thoraxdrain verkregen wordt. Ook peroperatief kan pleuravocht afgenomen worden.
Afname materiaal	Steriel potje met schroefdrop. 
Afname instructies	Diagnostische punctie: Na desinfectie van de huid aantal cc pleuravocht in potje doen. Alternatief: afgedopte spuit <u>zonder naald</u> insturen. Uit thoraxdrain: Pleuravocht <u>rechtstreeks uit drain</u> afnemen; in principe geen vocht uit drainzak/-pot insturen. Verkregen bij operatieve ingreep: Aantal cc pleuravocht in potje doen. Potje voorzien van een patiënten etiket
Aanvraagformulier	Digitale aanvraag in HiX SC of LMMI aanvraagformulier. Voorzie deze van: - benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van afname etc. - soort materiaal - gevraagd onderzoek Van pleuravocht wordt altijd een Gram-preparaat gemaakt. NB: pleuravocht wordt niet standaard op Tuberculose onderzocht; indien dat gewenst wordt, dat apart aangeven. Dan wordt moleculair

	onderzoek gedaan naar tuberculose én er wordt een Mycobacteriën-kweek ingezet.
Transport naar laboratorium	Op dag van afname op het LMML (laten) bezorgen.
Bewaren na afname	Na afname maximal 24 uur bewaren in de koelkast.
Geschatte duur onderzoek	Bij alleen banale kweek: 3-5 dagen Tuberculose PCR: 1-7 dagen Tuberculose kweek: 8 weken