

Respiratoire materialen – Sputum/ lavage / tracheaspoeling

Soort onderzoek	Kweek van sputum, lavage of tracheaspoeling
Te onderzoeken patiënten-materiaal	Opgehoest sputum, lavagemateriaal of tracheaspoeling Ook geschikt voor andere vloeistoffen m.u.v. liquor . Opmerking: als er (erg) weinig materiaal is, afnemen m.b.v. eSwab
Afname materiaal	Steriel potje met schroefdrop.
Afbeelding afnamemateriaal	
Afname instructies	Aantal cc sputum, lavage of tracheaspoeling in potje doen. Daarna het potje m.b.v. de schroefdrop goed dicht draaien zodat het potje niet lekt. Voorzie het potje van een patiëntenetiket.
Aanvraagformulier	Digitale aanvraag in HiX SC of LMMI aanvraagformulier. Voorzie deze van: - benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van afname etc. - soort materiaal, - gevraagde onderzoek Van deze materialen wordt altijd standaard een Gram-preparaat gemaakt.
Transport naar laboratorium	Op dag van afname op het LMMI (laten) bezorgen.
Bewaren na afname	Na afname maximal 24 uur bewaren in de koelkast.

Geschatte duur onderzoek	Bij alleen aerobe kweek: 1-3 dagen Bij aerobe én anaerobe kweek: 3-7 dagen
--------------------------	---