

SOA onderzoek

Soort onderzoek	Onderzoek naar Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA)
Te onderzoeken patiënten-materiaal	Bij voorkeur inzenden voor onderzoek naar <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (GO) en <i>Chlam. trachomatis</i>: Mannen: - enkele cc 1e straalsochtendurine in een urinepotje Vrouwen: - diepe vaginuitstrijk in eSwab of UTM Uitstrijk van urethra, cervix, vagina of anus (rectum) voor onderzoek naar <i>Chlamydia trachomatis</i>, <i>Neisseria gonorrhoeae</i>, evt <i>Trichomonas vaginalis</i>, evt Herpes Simplex virus (HSV) Urine voor onderzoek naar <i>Chlamydia trachomatis</i>, <i>Neisseria gonorrhoeae</i>; indien gewenst ook <i>Trichomonas</i> en/of Herpes Simplex virus. Uitstrijk van urethra, cervix, vagina of anus (rectum) voor (banale) kweek of GO-kweek van pussige uitvloed NB voor serologisch onderzoek naar <i>Chlamydia trachomatis</i> bij PID: buis met stolbloed inzenden voor serologisch onderzoek
Afname materialen	SOA-setje met: eSwab  UTM-medium  - Urinepotje

	
Afname instructies	eSwab / UTM medium Neem m.b.t. de meegeleverde wattenstokjes een uitstrijk van urethra, cervix, vagina, anus of rectum. Doe deze dan in het buisje van de eSwab / UTM. Urine Enkele cc 1^e-straals ochtendurine opvangen in het urine potje voor onderzoek naar Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae. Bij mannen is deze methode net zo gevoelig als een urethrawat; bij vrouwen kan een evt. cervicitis gemist worden.
Aanvraagformulier	Digitale aanvraag in HiX SC of LMMI-aanvraagformulier hiervoor gebruiken. Voorzie deze van: - benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens. - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van afname etc. - gevraagde onderzoek(en).
Transport naar laboratorium	Op dag van afname op het LMMI (laten) bezorgen.
Bewaren na afname	eSwab / UTM kan tot enkele dagen in de koelkast bewaard worden. Banale kweek kan tot 24 uur in de koelkast bewaard worden.
Geschatte duur onderzoek	SOA diagnostiek m.b.v. PCR: 1-3 dagen SOA diagnostiek m.b.v. kweek: 3-5 dagen