

Urinekweek buiten ziekenhuis

Soort onderzoek	Kweek van urine <u>buiten het ziekenhuis</u>
Te onderzoeken patiënten-materiaal	Urine
Afname materiaal	Grote urinecontainer (blauw deksel met adapter voor vacutainerbuis) <u>plus</u> vacuümbuisje met geelgroene dop met in het buisje boorzuurpoeder (op het etiket: BD Vacutainer Plus C&S Boric Acid) (NB urine in boorzuur is alleen geschikt voor kweek, niet voor chemie)
Afbeelding afnamemateriaal	Grote urinebeker met blauw deksel met daarin adapter voor vacutainerbuis  Boorzurmbuisje

	
Afname instructies	Vang na goede reiniging van de externe genitaliën urine (bij voorkeur ochtendurine) op in de grote urinebeker (met in het blauwe deksel een adapter voor vacutainerbuis). Zwenk de urinecontainer 3-5x voor een goede menging. Verwijder de beschermende sticker van het blauwe deksel. Schrijf naam + geboortedatum van de patiënt op het etiket van het vacutainerbuisje. Duw de urinebuis <u>met dop</u> in de opening met beschermde naald, in het blauwe deksel van de urinecontainer. Door het vacuüm zal de boorzuurbuis zich met urine vullen. Deze buis met urine + aanvraagformulier opsturen naar LMML.
Aanvraagformulier	Het LMML aanvraagformulier hiervoor gebruiken. Voorzie deze van: - benodigde patiëntgegevens - aanvrager gegevens - klinische gegevens, duur van de ziekte, datum van afname etc.

	- bijzonderheden: bv. CAD-urine, urine uit nefrostomie, etc. Vul op het aanvraagformulier materiaal en het gevraagde onderzoek in.
Transport naar laboratorium	Bij voorkeur op dag van afname op het LMMI (laten) bezorgen; boorzuururine kan max. 3 dg. na afname nog voor kweek ingezet worden.
Bewaren na afname	Na afname maximaal 2 dagen bewaren in de koelkast.
Geschatte duur onderzoek	Bij alleen banale kweek: 1 – 4 dagen