

Norovirus	
Status van infectie	Soort onderzoek en af te nemen materiaal.
Actuele infectie (diarree)	Feces voor onderzoek middels PCR. Het onderzoek wordt alleen verricht op vloeibare feces.
Welke afnamematerialen moet ik gebruiken?	
Afname materiaal	Fecespotje (potje met blauw deksel met daaraan een klein schepje). 
Afname instructies	Schrijf naam + geboortedatum patiënt op het etiket van het potje. Breng m.b.v. het schepje ca. 5 g feces over in het potje (tenminste een vol schepje).
Wat te doen na afname	Vul een digitale / papieren aanvraagformulier volledig in en geef in de kolom voor moleculair onderzoek aan dat onderzoek naar Norovirus gewenst is (aankruisen of handmatig noteren).
Bewaren monster tot transport naar laboratorium	Feces max. 24 uur in de koelkast bewaren.
Transport naar laboratorium	Gevuld potje feces (en aanvraagformulier) bij voorkeur op de dag van afname op het LMMI (laten) bezorgen. Indien dat niet mogelijk is, na afname in de koelkast zetten. Zie ook <i>Logistiek en transport</i>.
Geschatte duur onderzoek	PCR: rapportage op dag van ontvangst of volgende dag. Positieve en/of belangrijke uitslagen worden doorgaans ook telefonisch doorgegeven.