

Instructieformulier voor het afnemen van inventarisatiekweken.

Inhoud van de set

In deze set vindt u alle materialen die nodig zijn voor het afnemen en opsturen van de kweken voor onderzoek naar de dragerschap van MRSA en/of andere BRMO.

In het witte verzendetui bevindt zich:

- een instructieformulier voor het afnemen van de inventarisatiekweken (tevens uw aanvraagformulier)
- 4x een eSwab (wattenstok en transportmedium) voor het afnemen van inventarisatiekweken
- blisterverpakking incl. absorptievelletje en safetybag

Welke kweken dienen afgenomen te worden?

Inventarisatiekweken van de volgende locaties worden in één keer afgenomen.

Voor onderzoek naar dragerschap van alleen MRSA of MRSA + andere BRMO:

1 x neus, 1 x keel, 1 x rectum; eventueel 1 x wond/huidlaesie/andere herkomst

Voor onderzoek naar dragerschap van alleen BRMO, anders dan MRSA:

1 x rectum



Instructies voor afname

Alle inventarisatiekweken worden afgenomen met behulp van een eSwab volgens onderstaande gebruiksinstructie. Volg ook de aanvullende instructies per soort kweek.

Neuskweek:

Strijk met de wattenstok in beide neusgaten (neuspeutergebied); 1x stevig ronddraaien.

Vermeld op de buis met de swab: naam, geboortedatum en de herkomst van het materiaal: **neus**

Keelkweek:

Strijk met de wattenstok over de tonsillen en/of achterste keelwand.

Vermeld op de buis met de swab: naam, geboortedatum en de herkomst van het materiaal: **keel**

Rectumkweek:

Duw de wattenstok even in het rectum (zoals een thermometer).


Vermeld op de buis met de swab: naam, geboortedatum en de herkomst van het materiaal: **rectum**

Kweek wond/huidlaesie/andere herkomst (bij onderzoek naar MRSA):

Strijk enkele keren stevig over de wondbodem.

Vermeld op de buis met de swab: naam, geboortedatum en de herkomst van het materiaal: **wond + locatie**

Zo nodig kan meer dan 1 wond/huidlaesie worden onderzocht. Neem dan telkens een nieuwe eSwab (uit een andere MRSA / BRMO – set).

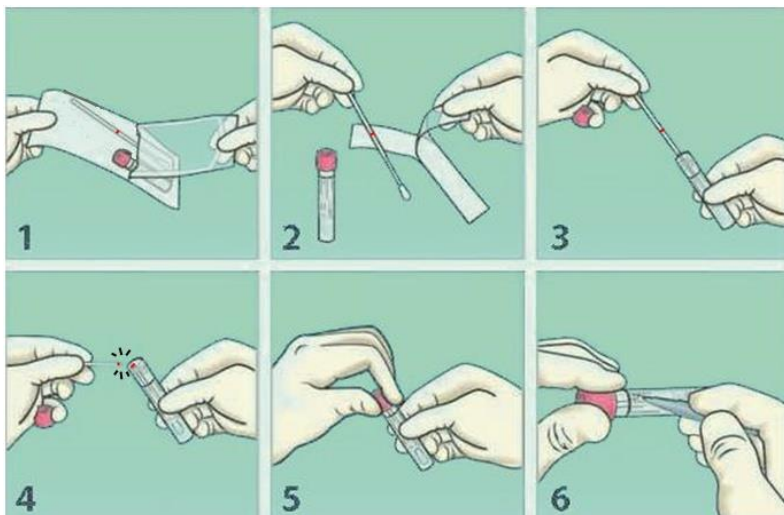

1. Open de verpakking.
2. Haal het buisje en de swab uit de verpakking. Let op: de swab nooit neerleggen en altijd bovenaan vasthouden (niet onder het rode streepje) om het monster te nemen. Neem het monster.
3. Open het buisje en steek de swab erin (zonder de omgeving aan te raken).
4. Breek de swab af aan het breekpunt (op het rode streepje).
5. Draai de dop op het buisje tot dit goed gesloten is.
6. Schrijf op het buisje de naam en de geboortedatum van de patiënt en de herkomst van het materiaal.

Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie
Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE Deventer
Telefoon: 0570 – 53 50 87, Fax 0570 – 50 14 34
E-mail: microbiologie@dz.nl
Internet: https://www.dz.nl/medische-microbiologie

BSN nummer :
Naam :
Geb. datum :
Geslacht :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :

Klinische gegevens
Reden kweek afname
Inzender

Afname
datum:.....

- ☐ inventarisatiekweek
- ☐ controle na behandeling
- ☐ gebruikt antibiotica, welke?

.....

Naam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Instelling :

Materiaal

Maak een keuze:

☐ 3 uitstrijken: neus, keel en rectum
herkomst:.....

☐ 1 uitstrijk: rectum

Indien van toepassing:

☐ uitstrijk wond / huidlaesie,

Gewenst bacteriologisch onderzoek

Maak een keuze:

- ☐ Inventarisatie van alleen MRSA (neus, keel en rectum; per locatie een kweek, zo nodig een extra kweek voor een wond/huidlaesie/andere herkomst)
- ☐ Inventarisatie van MRSA én BRMO (neus, keel en rectum; per locatie een kweek, zo nodig een extra kweek voor een wond/huidlaesie/andere herkomst)
- ☐ Inventarisatie van alleen BRMO (kweek rectum; zo nodig een extra kweek voor een wond/huidlaesie/andere herkomst)

Opmerking voor het laboratorium:

Betreft inventarisatiekweeken of controlekweeken na behandeling. Monsters niet poolen.

→ **Vul bovenstaand aanvraagformulier in en retourneer dit formulier met de monsters naar** ←
→ **het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie** ←
→ **van het Deventer Ziekenhuis** ←

Transport / verzending naar het LMMI van het Deventer Ziekenhuis

De monsters en dit ingevulde formulier dienen te worden verpakt en verzonden naar het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMMI) van het Deventer Ziekenhuis. Dit dient zo spoedig mogelijk (liefst binnen 24 uur na afname van de monsters) te gebeuren.

Doe de eSwabs in de blisterverpakking met het absorptievelletje. Sluit de blisterverpakking en doe deze in de safetybag. De safetybag goed sluiten door de witte afdekstrip van de blauwe band te verwijderen en voor- en achterzijde goed aan te drukken.

Doe de gesloten safetybag met inhoud, samen met dit formulier, in het verzendetui. Zorg dat de adreskaart gericht is aan het laboratorium van het Deventer Ziekenhuis en sluit de rits. Het gesloten verzendetui kan zonder frankeren per post naar het laboratorium worden geretourneerd.

Om transport te versnellen kan het verzendetui ook naar het laboratorium worden gebracht. Tijdens reguliere werktijden kan dit worden afgegeven aan de balie van de laboratoria in de centrale hal van het Deventer Ziekenhuis (looproute 40). Buiten reguliere werktijden kan het verzendetui worden afgegeven bij de receptie van de huisartsenpost / spoedeisende hulp van het Deventer Ziekenhuis (Spoedpost Deventer).